



mamiVac® **LACTIVE**

**Інструкція з експлуатації електричного
молоковідсмоктувача**



CE 0124
REF 287000

GB1030009UA
Станом на: 2013-06

MEDIZINTECHNIK PUMPEN
www.KaWeCo.de

Made in Germany



Перед початком використання молоковідсмоктувача **mamivac® Lactive** уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її.

Зміст

1. Призначення	стор. 3
1.1. Показання	стор. 3
1.2. Протипоказання	стор. 4
1.3. Побічні ефекти	стор. 4
2. Конструкція та складові частини	стор. 5
3. Експлуатація приладу	стор. 6
4. Очищення та догляд	стор. 8
5. Важливі вказівки стосовно техніки безпеки	стор. 8
6. Умови транспортування, зберігання та використання	стор. 10
7. Гарантія	стор. 10
8. Практичні поради	стор. 10
9. Зберігання материнського молока	стор. 12
10. Несправності та їх усунення	стор. 13
11. Охорона навколишнього середовища та утилізація	стор. 13
12. Технічні характеристики	стор. 14
13. Таблиця відповідностей	стор. 17
14. Умовні позначення	стор. 18
15. Запчастини та приладдя	стор. 19
16. Виробник	стор. 19

Поздоровляємо вас!

Дякуємо вам за те, що зупинили свій вибір на нашому виробі. Бажаємо вам та вашому малюку щастя, здоров'я та вдалого годування груддю, під час якого ми підтримуємо вас за допомогою продукції торгової марки **mamivac®**. Інші продукти нашого виробництва ви знайдете на сайті www.tespro.ua.



1. Призначення

Прилад **mamivac® Lactive** допомагає обережно зцідити та зібрати грудне молоко жінкам, які мають труднощі з природним годуванням. Проблеми можуть бути пов'язані, наприклад, з фізіологією жінки або малюка.

За допомогою молоковідсмоктувача **mamivac® Lactive** можливо:

- збільшити кількість молока шляхом повного зціджування грудей
- зберегти лактацію з метою подальшого годування малюка молоком матері природним шляхом.

1.1. Показання

Молоковідсмоктувач **mamivac® Lactive** призначений для обережного зціджування та збирання материнського молока в ситуаціях, коли природне годування неможливе, або при проблемах з лактацією. Використання молоковідсмоктувача **mamivac® Lactive** рекомендоване у наступних випадках:

- мастит (інфекційне запалення молочної залози)
- анатомічні особливості сосків (плоскі, втягнуті соски), які ускладнюють грудне годування малюка
- недостатнє утворення молока
- висока чутливість сосків

- надлишок молока (надмірна секреція молока, "лінивий сосунець")
- недоношені діти (дитина занадто слабка, щоб сосати, або новонароджений повинен знаходитися на відстані від матері)
- порушення обміну речовин малюка
- анатомічні дефекти в області обличчя малюка (вроджена щілини губи та/або піднебіння)
- захворювання матері, при яких годування груддю малюка на протязі певного часу неможливо (наприклад, пов'язане з прийомом медикаментів)

1.2 Протипоказання

Протипоказанням до користування пристроєм може бути алергія на матеріал насадки - силікон, який має безпосередній контакт зі шкірою. Насадки входять до комплекту деяких молоковідсмоктувачів **mamivac®**. Приймання певних медикаментів також є протипоказанням для годування малюка груддю, пов'язане з попаданням діючих фармакологічних речовин до материнського молока. Вказівки щодо застосування медикаментів під час годування груддю дивіться в інструкції виробника лікарського засобу. Зберегти лактацію під час прийому медикаментів, які обмежують годування груддю, можливо шляхом зціджування молока за допомогою молоковідсмоктувача.

1.3 Побічні ефекти

- В деяких випадках можливо подразнення шкіри у вигляді почервоніння або утворення червоних плям.
- У разі алергії на силікон треба відмовитися від використання силіконової насадки. Насадки входять до комплекту деяких молоковідсмоктувачів **mamivac® Pumpset**.

2. Конструкція та складові частини mamivac® Lactive



- a) Регулятор вакууму (**Vacuum**)
- b) 2-позиційний перемикач (**Phase**)
- c) Повзунковий регулятор для одного чи двох молоковідсмоктувачів
- d) Гніздо підключення першої насадки
- e) Гніздо підключення другої насадки
- f) Відкидна кришка з боковою підставкою для насадок (чашок)
- g) Блок живлення
- h) Роз'єм для блоку живлення
- i) Місце для фото вашого малюка для додаткового стимулювання процесу лактації.

3. Експлуатація приладу

Перед початком експлуатації молоковідсмоктувача зверніть увагу на наступне:

- З метою профілактики порушень використовуйте тільки оригінальні комплектуючі молоковідсмоктувачів **mamivac®**.
- Дотримуйтеся вказівок щодо миття та дезінфекції приладу, вказаних у розділі 4.
- При збиранні частин молоковідсмоктувача дотримуйтеся інструкції.
- Використовуйте повітряний шланг з наступними розмірами: зовні Ø 5,5 мм, усередині Ø 2,5 мм, довжина прибіл. 1 м.


Регулювання інтенсивності та вибір циклу зціджування за допомогою 2-позиційного перемикача **mamivac®**

Молоковідсмоктувач **mamivac® Lactive** дозволяє імітувати природний процес смоктання. Цей процес розділяється на дві фази (стимулювання та зціджування).


Фаза стимулювання

(фаза 1. низький рівень вакууму):

імітує швидке, але менш інтенсивне смоктання груди малюком. Забезпечує прилив молока. Зробіть наступні дії:

Увімкніть прилад - регулятор у положенні .

Переведіть 2-позиційний перемикач

у положення , що відповідає кількості 60 циклів на хвилину. Переконайтеся, що регулятор вакууму знаходиться у першій третині області регулювання (низький рівень вакууму).




Після того, як почався процес виділення молока, але не пізніше, ніж через 2 хвилини переведіть перемикач у друге положення.

Фаза зціджування


(фаза 2. високий рівень вакууму):




Після стимулювання починається прилив молока. Зараз ви можете м'яко та ефективно зцідити грудне молоко.

Переведіть перемикач у положення , що відповідає кількості 30 циклів на хвилину.

Фаза зціджування дозволяє повільно регулювати інтенсивність за допомогою регулятора вакууму.

Вимкання приладу.

Переведіть регулятор вакууму у положення . Прилад вимкнений.

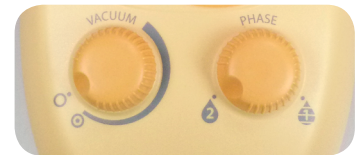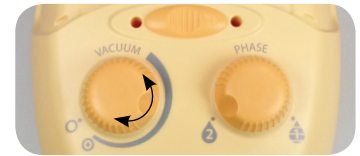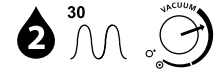

4. Очищення та догляд за приладом

- Витягніть штекер блоку живлення або розетку з електромережі, якщо ви не користуєтеся приладом, перед його очищенням або при наявності несправностей в роботі.
- Для очищення корпусу не використовуйте абразивні миючі засоби (розчинники та ін.), замість цього візьміть змочену в мильному розчині тканину. Після миття витріть корпус насухо м'якою тканиною. Слідкуйте за тим, щоб вода не попала усередину приладу.
- У разі дезінфекції корпусу використовуйте засіб для дезінфекції на основі спирту.



Ніколи не мийте прилад під проточною водою!

Очищення та догляд

- Виконуйте вказівки по догляду за відповідним молоковідсмоктувачем.
- Перед кожним використанням ретельно очищуйте усі частини молоковідсмоктувача, які мають контакт з материнським молоком.
- З метою дезінфекції у домашніх умовах ми рекомендуємо кип'ятіння на протязі не менше 10 хвилин у звичайній каструлі (не пароварці) або стерилізаторі. Не використовуйте ніяких хімічних засобів для дезінфекції!

Перед тим, як зібрати прилад, переконайтеся, що мембрана повністю

висохла та не має пошкоджень (подряпин, тріщин та ін.).



5. Важливі вказівки стосовно техніки безпеки

- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенню, вказаному на блоці живлення, або знаходиться в межах означених величин.
- Прилад **mamivac® Lactive** не можна використовувати в операційних та вибухонебезпечних приміщеннях.
- Прилад не призначений для використання на вулиці або в транспорті.
- **Mamivac® Lactive** призначений лише для зціджування материнського молока. Використання для інших цілей заборонено.

- Прилад призначений лише для домашнього використання.
- При користуванні **mamivac® Lactive** встановлюйте прилад на рівну та стійку поверхню.
- **Після 30-хвилинного використання залиште прилад охолонути на протязі 30 хвилин!**
- Використовуйте та зберігайте **mamivac® Lactive** лише в сухих приміщеннях.
- У разі несправностей в роботі приладу звертайтеся до виробника або продавця.
- **Якщо вам здається, що подальша експлуатація приладу не відповідає правилам безпеки, наприклад, у разі пошкодження ізоляції мережевого кабелю або з'єднання між блоком живлення та молоковідсмоктувачем, одразу відключіть прилад від електромережі (вийміть вилку з розетки) та не вмикайте його. Лише таким чином ви забезпечите відсутність контакту приладу з електромережею.**
- Прилад **mamivac® Lactive** потребує особливих запобіжних заходів відносно до електромагнітної сумісності. Дотримуйтесь вказівок стосовно правил безпеки, приведених у розділі 12 (Технічні характеристики).
- Надійну та безперебійну роботу приладу гарантує використання у комбінації лише з тими приладами, компонентами та системами, які вказані в розділах 2 та 16.
- Підключайте лише оригінальні мережеві блоки живлення, адаптери або трансформатори, рекомендовані виробником.
- Перед ввімкненням приладу перевірте пляшку для молока на наявність пошкоджень та замініть її при необхідності. При дуже частому кип'ятінні пляшки та частин молоковідсмоктувача не виключена можливість підвищення ламкості пластика та виникнення подряпин або тріщин. Пошкоджені частини повинні бути замінені на нові.
- Не слід виключати можливість впливу переносних та мобільних комунікаційних систем ВЧ-зв'язку, включаючи мобільні та радіотелефони, на цей прилад. Електромагнітне середовище, в якому прилад працює без перешкод, описане в розділі 12.

6. Умови транспортування, зберігання та використання

- Уникайте ударів та штовхання приладу в запакованому та розпакованому вигляді.
- Уникайте різкої зміни температур, високої атмосферної вологості та запиленних приміщень.
- Користуватися приладом дозволяється при температурі від +0 °C до +40 °C, відносній вологості повітря від 30 % до 60 % (пар не конденсується) та атмосферному тиску від 860 гПа до 1060 гПа.
- Зберігати та транспортувати прилад можна при температурі навколишнього середовища від -20 °C до +70 °C, відносній вологості повітря від 10% до 85% та атмосферному тиску від 500 гПа до 1060 гПа.

7. Гарантія

- Гарантія на вакуумний насос складає 12 місяців з дати покупки.
- Гарантія на приладдя молоковідсмоктувача не розповсюджується.
- **Втрата гарантії:** Застосування приладу не за призначенням, з приладдям молоковідсмоктувача, не призначеним для нього, чи відкривання корпусу веде до втрати гарантії.

8. Практичні поради

- Перед першим та перед кожним наступним застосуванням очистіть комплектуючі молоковідсмоктувача та зберіть його відповідно до вказівок інструкції.
- Перед застосуванням приладу ретельно вимийте руки водою з милом та витріть груди вологою тканиною.
- Запобігти тріщини сосків можливо уникаючи використання очищувальних засобів, таких як мило чи спирт.
- Підготуйтеся до процесу зціджування: сядьте зручно та розслабтесь.

- Накладіть насадку молоковідсмоктувача на грудь таким чином, щоб вона міцно прилягала.
- До **mamivac® Lactive** можна підключати одну чи дві насадки. З метою економії часу ви можете зціджувати одночасно з обох грудей (**подвійне зціджування**).
- Почніть процес зціджування. Дотримуйтесь правил користування приладом, описаних у розділі 3.
- **Mamivac® Lactive** працює також у режимі стимуляції, що забезпечує прилив молока. Для підсилення лактації рекомендується додатково масажувати грудь другою рукою.
- Послідовно зцідьте обидві груди, якщо лікарем або акушеркою не прописане інакше.
- Час, потрібний для зціджування, може відрізнятись, тому при наявності питань звертайтеся до акушерки чи консультанта щодо грудного вигодовування.

Вказаний тут час зціджування є орієнтовним.

З однією насадкою:

Схема зціджування: послідовно зцідити обидві груди по 5 хвилин, потім кожну по 3 хвилини та ще раз по 2 хвилини.


З двома насадками:

обидві груди зціджувати одночасно на протязі 10 хвилин (**подвійне зціджування**).

- Контролюйте наповненість пляшок молоковідсмоктувача. Не допускайте їх переповнення. Якщо рівень зцідженого молока досяг помітки 100 мл, слід перелити молоко в більшу ємкість. Для цього слід відключити прилад.

9. Зберігання материнського молока

- Материнське молоко слід взяти одразу або зберігати у холоді:

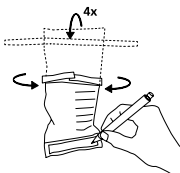

до **48 годин** у холодильнику,

2 тижні в морозильному відділенні з маркуванням **,

3 місяці в морозильному відділенні з маркуванням ***,

та **6 місяців** в морозильній шафі

- Пляшки, призначені для заморожування, наповніть на 2/3 та запишіть дату наповнення.

- Замість пляшок ви можете скористатися **спеціальним пакетом для заморожування молока mamivac®**.

- Не розморозьте материнське молоко** мікрохвильовій печі, замість цього поставте пляшку або пакет у теплу воду.

- Після розмороження злегка збовтайте пляшку або пакет, щоб перемішати молоко.

У рідких випадках молоко містить велику кількість ензиму, завдяки якому молоко після заморожування стає згірклим. З метою виключення згірклості молока заморозьте невелику кількість молока. Якщо після розморожування молоко згіркло, то перед замороженням його треба довести до кипіння, щоб дезактивувати ензим.

10. Несправності та їх усунення

Захисна мембрана ефективно запобігає попаданню рідини та твердих часток усередину приладу. Якщо по якимось причинам сторонні тіла або рідина попали усередину насосу або виникли інші проблеми, одразу відключіть прилад від мережі. Зверніться до продавця або у відповідну сервісну службу.

Несправність	Помилка / допомога
Прилад не вмикається	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте штепсельні роз'єми електроживлення Світлодіод блоку живлення повинен горіти (якщо він є) Якщо проблема не зникла, зверніться до сервісної служби вашого продавця.
Прилад не працює (не створює вакуум)	<ul style="list-style-type: none"> Спробуйте декілька разів ввімкнути та вимкнути прилад. Поміж спробами робіть паузу одну хвилину. Перевірте, чи правильно зібраний молоковідсмоктувач Перевірте клапан (на наявність тріщин або забруднення) Перевірте захисну мембрану на наявність тріщин Захисна мембрана повинна прилягати щільно та без зморшок Перевірте місця приєднання шлангу.

11. Охорона навколишнього середовища та утилізація

Утилізація відпрацьованих насосів **mamivac® Lactive** виконується відповідно до місцевих розпоряджень щодо утилізації відходів.

12. Технічні характеристики

mamivac Lactive

Номинальна напруга:	12 В постійного струму	Класифікація приладу:
Сила струму:	1,0 А	Класифікація відповідно директивам 93/42/ЄЕС:
В x Ш x Г (мм):	115 x 125 x 195	Стаття 9, додаток IX:
Вага: прибл.	630 г	Клас ІІа / правило 11
Вакуум макс.:	-33 кПа (± 15%)	
Середній вакуум:	прилад призначений для короткотривалої експлуатації без довгочасного створення вакууму	

Блок живлення

Номинальна вхідна напруга:	100-240 В перемінного струму 50 / 60 Гц
Вихідна напруга:	12 В постійного струму
Клас захисту:	ІІ

Вказівки щодо електромагнітної сумісності

Директиви та декларація виробника - електромагнітне випромінювання

Прилад mamivac® Lactive призначений для експлуатації в зазначеному нижче електромагнітному середовищі. Споживач приладу повинен переконатися у відповідності умов використання зазначеним нижче.

Виміри випромінювання	Відповідність	Рекомендації щодо електромагнітного оточення
ВЧ-випромінювання згідно CISPR 11	Група 1	Прилад mamivac® Lactive використовує ВЧ-енергію виключно для своїх внутрішніх потреб. Тому ВЧ-випромінювання цього приладу вкрай мале та не може впливати на інші електричні прилади.
ВЧ-випромінювання відповідно до CISPR 11	Клас В	Прилад mamivac® Lactive призначений для використання в усіх приміщеннях, включаючи житлові та інші, які мають підключення до мережі енергопостачання, призначеної для живлення житлових будівель.
Гармонічна складова відповідно до IEC 61000-3-2	Клас А	
Коливання / різкі перепади напруги відповідно до IEC 61000-3-3	виконується	

Директиви та декларація виробника - захищеність від електромагнітних перешкод

Прилад mamivac® Lactive призначений для експлуатації в зазначеному нижче електромагнітному середовищі. Споживач mamivac® Lactive повинен переконатися у відповідності умов використання зазначеним нижче.

Перевірка захищеності від електромагнітних перешкод	IEC 60601-рівень вимог	Рівень відповідності вимогам	Рекомендації щодо електромагнітного оточення
Розряд статичної електрики IEC 61000-4-2	± 6 кВ Контактний розряд ± 8 кВ Повітряний розряд	± 6 кВ Контактний розряд ± 8 кВ Повітряний розряд	Підлога повинна бути з бетону, з дерева або покрита кахельною плиткою. Якщо підлога має покриття з синтетичних матеріалів, відносна вологість повітря повинна складати не менш 30 %.
Величина електричних перешкод при переходних процесах / значення максимальної імпульсної напруги відповідно до IEC 61000-4-4	± 2 кВ для мережевих шнурів ± 1 кВ для вхідних та вихідних шнурів => не застосовується	± 2 кВ для мережевих шнурів ± 1 кВ для вхідних та вихідних шнурів => не застосовується	Якість напруги живлення повинна відповідати стандартним вимогам для комерційних приміщень та лікарень.
Імпульсна напруга (стійкість до мікросекундних імпульсних перешкод) відповідно до IEC 61000-4-5	± 1 кВ Протифазна напруга (симетрична)	± 1 кВ Протифазна напруга (симетрична)	Якість напруги живлення повинна відповідати стандартним вимогам для комерційних приміщень та лікарень.
Просадка напруги, короткочасне переривання та коливання напруги живлення відповідно до IEC 61000-4-11	< 5 % УТ для 1/2 періодів (> 95 % провал) 40 % УТ для 5 періодів (60 % провал) 70 % УТ для 25 періодів (30 % провал) < 5 % УТ для 5 с (> 95 % провал)	< 5 % УТ для 1/2 періодів (> 95 % провал) 40 % УТ для 5 періодів (60 % провал) 70 % УТ для 25 періодів (30 % провал) < 5 % УТ для 5 с (> 95 % провал)	Якість напруги живлення повинна відповідати стандартним вимогам для комерційних приміщень та лікарень. Якщо користувач mamivac® Lactive потребує безперервної роботи приладу під час переривання у постачанні електроенергії, рекомендується підключити mamivac® Lactive до пристрою безперебійного енергопостачання чи акумуляторні батареї.
Магнітне поле при частоті у мережі (50/60 Гц) відповідно до IEC 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Магнітні поля при вказаній частоті у мережі повинні відповідати стандартним вимогам для комерційних приміщень та лікарень.

ПРИМІТКА: УТ - напруга у мережі при проведенні контрольних вимірів.

Перевірка захищеності від електромагнітних перешкод	IEC 60601-рівень вимог	Рівень відповідності вимогам	Рекомендації щодо електромагнітного оточення
ВЧ-перешкоди в дротах відповідно до IEC 61000-4-6	3 V _{rms} від 150 кГц до 80 МГц	3 В	<p>Переносні та мобільні радіоприлади, включаючи кабелі, не повинні використовуватися на меншій відстані від mamivac® Lactive, ніж рекомендована безпечна дистанція, яка розрахована по формулі відповідно до несучої частоти передавача.</p> <p>Рекомендована безпечна дистанція</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \text{ від } 80 \text{ МГц до } 800 \text{ МГц}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \text{ від } 800 \text{ МГц}$ <p>P - номінальна потужність передавача в ватах (Вт) відповідно до даних виробника передавача; d - рекомендована безпечна дистанція в метрах (м).</p> <p>Напруженість поля стаціонарних радіопередавачів повинна на усіх частотах бути менше вказаного рівня (відповідності).</p> <p>В електромагнітному полі приладів з вказаним позначенням можливі перешкоди.</p>
Випромінені ВЧ-перешкоди відповідно до IEC 61000-4-6	3 В/м від 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В/м	



ПРИМІТКА 1: При частоті 80 МГц та 800 МГц діє наступний частотний діапазон.

ПРИМІТКА 2: Зазначені рекомендації мають силу не в усіх випадках. На розповсюдження електромагнітних хвиль мають вплив абсорбція та рефлексія з боку будівель, предметів та людей.

(a) Напруженість поля стаціонарних передавачів, наприклад, базових станцій радіотелефонів та мобільних наземних радіостанцій, аматорських радіостанцій, АМ та FM радіо- та телерадіо передавачів теоретично не може бути точно врахована. Для розрахунку електромагнітного оточення з урахуванням стаціонарних передавачів повинно бути проведено дослідження на місці. Якщо результат розрахунку напруженості поля в місті, де використовується прилад, виявить перевищення зазначеного вище рівня відповідності, прилад повинен бути перевірений на заявлене виконання функцій. При наявності незвичайних характеристик можуть бути потрібні додаткові заходи, наприклад, зміна місця експлуатації приладу.

(b) В частотному діапазоні вище 150 кГц - 80 МГц напруженість поля повинна складати менш [V1] В/м.

Рекомендована безпечна дистанція проміж переносними / мобільними телекомунікаційними ВЧ-приладами та mamivac® Lactive

Прилад **mamivac® Lactive** призначений для експлуатації в зазначеному нижче електромагнітному середовищі. Користувачі приладу **mamivac® Lactive** можуть уникнути електромагнітних перешкод, дотримуючись мінімальної відстані проміж переносними / мобільними телекомунікаційними ВЧ-приладами (передавачами) та **mamivac® Lactive** залежно від вказаної нижче вихідної потужності комунікаційного приладу.

Номінальна потужність передавача, Вт	Безпечна дистанція залежно від частоти передавача, м			
	від 150 кГц до 80 МГц $d = 1,2 \sqrt{P}$	від 80 МГц до 800 МГц $d = 1,2 \sqrt{P}$	від 800 МГц до 2,5 ГГц $d = 2,3 \sqrt{P}$	
0,01	0,12	0,12	0,23	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73	0,73
1	1,20	1,20	2,3	2,3
10	3,79	3,80	7,3	7,3
100	12,00	12,00	23,0	23,0

Якщо номінальна потужність передавача не вказана в таблиці вище, відстань може бути розрахована за допомогою формули, приведеної у відповідному стовпчику, при цьому P - номінальна потужність передавача в ватах (Вт), по даним виробника передавача.

ПРИМІТКА 1: Для розрахування рекомендованої безпечної відстані до передавача в частотному діапазоні від 80 МГц до 2,5 ГГц введений додатковий коефіцієнт 10/3 для зменшення можливості перешкод у разі ненавмисного внесення у поле приладу мобільного/переносного комунікаційного приладу.

ПРИМІТКА 2: Зазначені рекомендації мають силу не в усіх випадках. На розповсюдження електромагнітних хвиль мають вплив абсорбція та рефлексія з боку будівель, предметів та людей.

Ми рекомендуємо дотримувати безпечну відстань від мобільних телефонів 3,3 м.

13. Таблиця відповідностей















1 кПа відповідає: **0,01 бар**

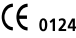0,14504 PSI відповідає: **7,5006 мм рт.ст.** відповідає: **1 кПа**

PSI = фунтів на квадратний дюйм

мм рт.ст. при 0 °C

14. Умовні позначення

	Дотримуватись правил безпеки.		Транспортування та зберігання: від -20 °C до +60 °C Експлуатація: від 0 °C до +40 °C
	Дотримуватись інструкції з експлуатації.		Виробник
	Знак відповідності директивам ЕС 93/42 EWG	IP40	Клас захисту
	Прилад має клас захисту II.		Постійний струм
	Робоча частина тип BF		Змінний струм
	Вкл.		Вхідний струм
	Викл.		Вихідний струм
ED 50%	Тривалість ввімкнення 30 хв. робота 30 хв. пауза	SN	Серійний номер
	Не утилізувати разом з побутовими відходами	REF	Артикульний номер

15. Запчастини та приладдя

Найменування
Молоковідсмоктувач механічний Mamivac® Easy
Захисні накладки силіконові для сосків округлої форми Mamivac®, розмір S
Захисні накладки силіконові для сосків округлої форми Mamivac®, розмір M
Захисні накладки силіконові для сосків конічної форми Mamivac®, розмір L
Пластикові одноразові пакети Mamivac® (для збору, транспортування і заморожування зцідженого молока)
Набір Mamivac® Ecomoty для відсмоктування грудного молока, розмір L
Набір Mamivac® Multi для відсмоктування грудного молока, розмір L
Термокомпрес для грудей Mamivac® THERMO-PACK
Креми для грудей Mamilan®
Пляшечка для збору грудного молока Mamivac®, стандартна різьба, PP

16. Виробник та дистрибутор



KaWeCo GmbH Тел.: +49 (0) 7156 / 1 76 02 100
 Gerlinger Str. 36-38 Факс: +49 (0) 7156 / 1 76 02 500
 D-71254 Ditzingen info@kaweco.de

Офіційний дистрибутор: ТОВ "Теспро",
 м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1
 тел.: (044) 220 11 05, www.tespro.ua

